

NOTICE D'UTILISATION DU MASQUE BARRIÈRE DAO



POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ ET
CELLE DES AUTRES, IL EST TRÈS
IMPORTANT DE RESPECTER CETTE
NOTICE D'UTILISATION.



- ➔ Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- ➔ Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- ➔ Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- ➔ Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- ➔ **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**
- ➔ Le masque barrière lavable Dao est un masque de type AFNOR SPEC S76-001:2020 et validé par la DGA en catégorie 1.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

- 1 Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique.
- 2 Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
- 3 Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
- 4 Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre :

- 1 Tenez le masque par les lanières élastiques.
- 2 Placez-le au niveau de votre bouche.
- 3 Passez les lanières élastiques dans le cou et derrière la tête.
- 4 Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez :

- 1 Évitez de le toucher et de le déplacer.
- 2 Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque :

- 1 Quand vous avez porté le masque 4h.
- 2 Quand vous souhaitez boire ou manger.
- 3 Quand il devient difficile de respirer.
- 4 Si le masque s'humidifie.
- 5 Si le masque est endommagé.
- 6 Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever :

- 1 Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
- 2 Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.
- 3 En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
- 4 Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
- 5 Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.

COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

Avant ouverture :

- 1 Stockez le masque dans un emballage propre et hermétique, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

- 1 Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
- 2 Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
- 3 Ce masque a été testé pour 10 lavages. Après 10 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.

- 4 Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en reformant les plis sans forcer.

Après le lavage :

- 1 Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches).
- 2 Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
- 3 Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.
- 4 Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

SÉCURITÉ

- 1 Ce masque a démontré une efficacité de filtration à 92 % pour des particules de 3 microns émises par une personne portant le masque.
- 2 La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m⁻².s⁻¹ et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

Contact fabricant :

DAO
5, rue Saint-Nicolas
54000 NANCY
03 55 20 75 41
www.daodavy.com